

# Návod na použitie

## Výrobca:

KUNA Jakub Nowiński  
ul. Zielona 25a/3, 90-602 Łódź  
tel: +48 42 678 65 28, +48 600 291 660  
www.kuna-vet.com kuna@kuna-vet.com

## Výhradný dovozca:

MVDr. Ján Brcko  
Sídlisko 1. mája 70, 093 01 Vranov nad Topľou  
tel: 057 44 63 902, 0905-173 703  
www.odchyt.sk obchod@odchyt.sk

## 1. Použitie

Pooperačná KOŠIELKA je textilný výrobok, určený pre zvieratá. Jeho úlohou je komfortná ochrana hrudníka a brucha pred znečistením a olizovaním. Používa sa hlavne u psov a mačiek na ochranu proti znečisteniu tela napr. po chirurgických zákrokoch, v dermatologickej praxi. Chráni pred pooperačnými komplikáciami (ranou infekciou, olizovaním rany a následným predčasným odstránením stehov zvieratom). Priložená hygienická vložka saje prípadný ranový sekrét a udržiava ranu v suchom prostredí.

## 2. Popis a zloženie



Košielka je ušitá z prvotriednej vzdušnej hypoalergénnej látky. Priložené fixačné pásky a manžety sú z bavlny. Použitý dizajn utahčuje oblečenie zvierata a neobmedzuje ho vo fyziologických potrebách.

## 3. Spôsob oblečenia

Pre určenie správnej veľkosti KOŠIELKY je podstatná vzdialenosť medzi hrudníkovými a panvovými končatinami. Výška a hĺbka trupu nie sú podstatné.

KOŠIELKA a manžety sú z pružného materiálu, fixačné pásky za zaväzujú na chrbte zvierata. Pre zabezpečenie trváciejšieho oblečenia posledné chrbtové pásky prevádzujú cez predposledné pásky.

vzdialenosť medzi hrudníkovými a panvovými končatinami	potrebná veľkosť KOŠIELKY
19 cm	XXS
22 cm	XS
28 cm	S
36 cm	M
40 cm	M/L
44 cm	L
51 cm	XL
59 cm	XXL
70 cm	XXXL

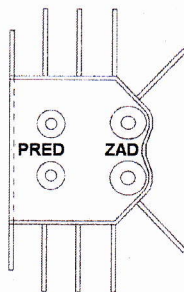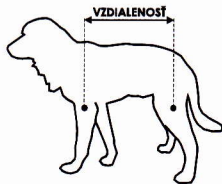

## 4. Opakované použitie

KOŠIELKU po dôkladnej parnej sterilizácii alebo po vypratí pri 90 st. C je možné opakovane používať. Priložená hygienická vložka je jednorazová.

Pre veterinárne použitie