

Návod na použitie

Výrobca:

„KUNA“ Krystyna Debowska-Kuna
ul. Narutowicza 108 90-145 Lodz
tel: +48 42 678 65 28, kom. +48 600 319 290
www.kuna-vet.com kuna@kuna-vet.com

Výhradný dovozca:

MVDr. Ján Brecko
Sídliisko 1. mája 70, 093 01 Vranov nad Topľou
tel: 057 44 63 902, 0905-173 703
www.odchyt.sk obchod@odchyt.sk

1. Použitie

Pooperačná KOŠIELKA je textilný výrobok, určený pre zvieratá. Jeho úlohou je komfortná ochrana hrudníka a brucha pred znečistením a olizovaním. Používa sa hlavne u psov a mačiek na ochranu proti znečisteniu tela napr. po chirurgických zákrokoch, v dermatologickej praxi ...

Chráni pred pooperačnými komplikáciami (ranovou infekciou, olizovaním rany a následným predčasným odstránením stehov zvierat'om).

Priložená hygienická vložka saje prípadný ranový sekrét a udržuje ranu v suchom prostredí.


2. Popis a zloženie

Košielka je ušitá z prvotriednej vzdušnej hypoalergénnej látky. Priložené fixačné pásky a manžety sú z bavlny. Použitý dizajn uľahčuje obliekanie zvierat'a a neobmedzuje ho vo fyziologických potrebách.


3. Spôsob obliečenia

Pre určenie správnej veľkosti KOŠIELKY je podstatná vzdialenosť medzi hrudníkovými a panvovými končatinami. Výška a hĺbka trupu nie sú podstatné.

KOŠIELKA a manžety sú z pružného materiálu, fixačné pásky sa zaväzujú na chrbte zvierat'a. Pre zabezpečenie trvajúcejšieho obliečenia posledné chrbtové pásky preväzujete cez predposledné pásky.

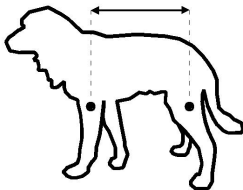

vzialenosť medzi hrudnými a panvovými končatinami	potrebná veľkosť KOŠIELKY
22 cm	XS
28 cm	S
36 cm	M
44 cm	L
51 cm	XL
59 cm	XXL
70 cm	XXXL

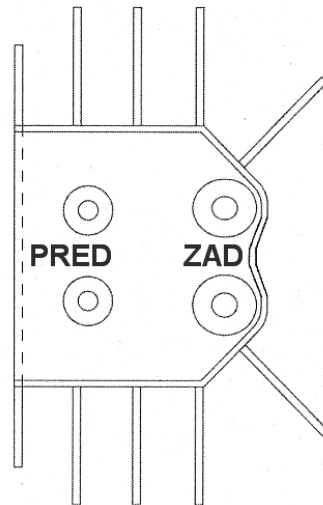

4. Opakované použitie

KOŠIELKU po dôkladnej parnej sterilizácii alebo po vypratí pri 90 st. C je možné opakovane používať. Priložená hygienická vložka je jednorazová.

Pre veterinárne použitie